


binax NOW®
Influenza A* & B

binax NOW®
RSV

* Der Binax NOW® Influenza A & B Test erfasst alle Influenza Stämme -
auch den auf den Menschen übertragbaren Erreger der Vogelgrippe H5N1 (Influenza A)

Antigennachweise aus Nasenspülflüssigkeit und Nasen-/Rachenabstrichmaterial

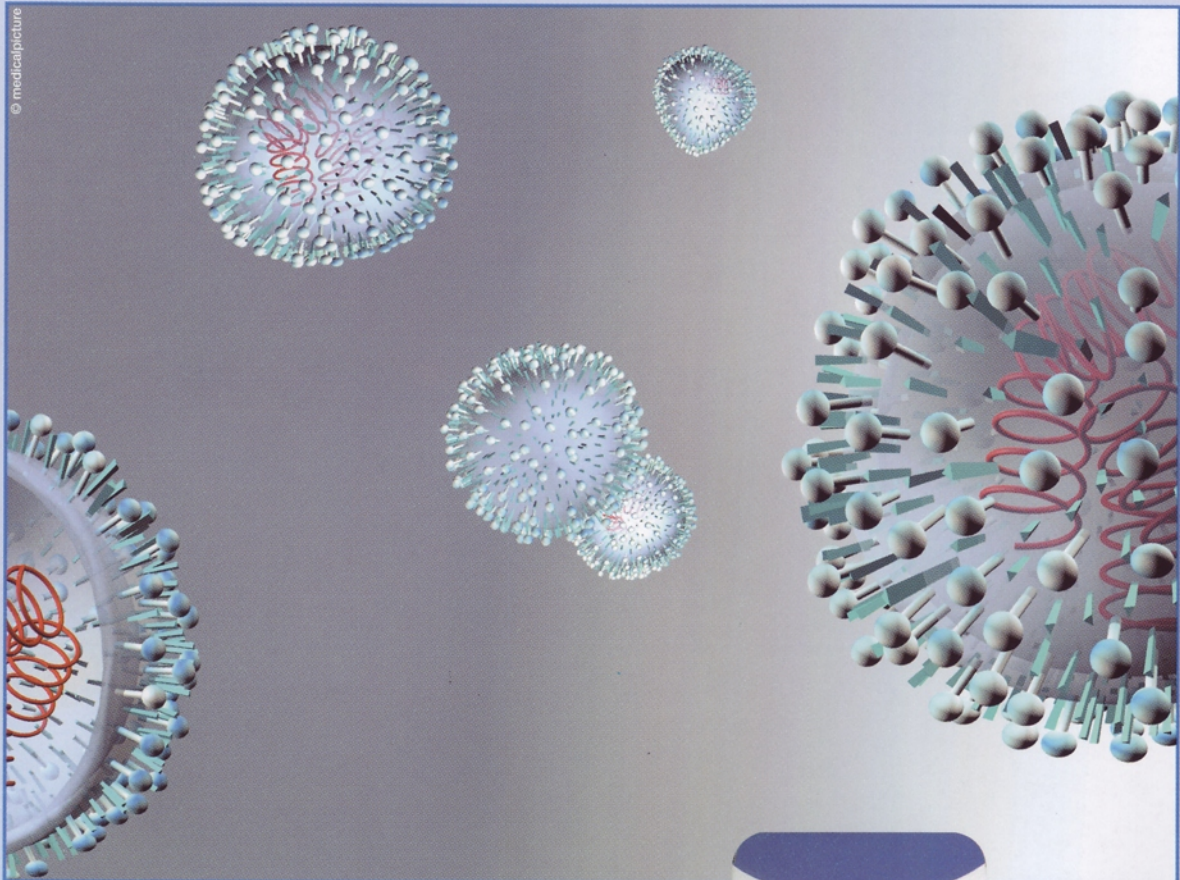


Die Vorteile der Binax® NOW Antigennachweise im Überblick:

- Nur ein Testschritt
- Differenzierung von Influenza A & B möglich
- Kein Einsatz von Laborgeräten
oder Reagenzien nötig
- Ergebnisse innerhalb von nur 15 Minuten
- Hohe Sensitivität und Spezifität (Daten umseitig)



Hersteller:
Binax, USA

 inverness medical
professional diagnostics

binax NOW® Influenza A & B

Die Symptome der Influenza-Infektion sind gekennzeichnet durch den plötzlichen Beginn mit Fieber und Kopfschmerzen, sowie durch einen raschen und meist schweren Verlauf. Bei frühzeitiger Diagnose und entsprechender Therapie mit Neuraminidase-Hemmern innerhalb von 36 Stunden nach Einsetzen der Symptomatik kann der Schweregrad der Erkrankung erheblich reduziert werden.

Mit dem **binax NOW® Influenza A & B Test** können Sie eine Influenza innerhalb von nur 15 Minuten diagnostizieren - so bleibt Ihnen ausreichend Zeit zum Handeln!

So einfach ist die Durchführung¹

1. Probe langsam auf das Probenpolster tropfen.



2. Testvorrichtung sofort danach schließen.



3. Nach 15 Minuten das Ergebnis im Fenster ablesen.

+
positiv



-
negativ



¹ Ausführliche Informationen siehe Gebrauchsanleitung

binax NOW® RSV

Das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) verursacht vor allem bei Kleinkindern im Alter zwischen 2 und 6 Monaten respiratorische Erkrankungen (Bronchiolitis, Lungenentzündung), generell sind jedoch Menschen aller Altersstufen gefährdet. Vor allem bei schweren Krankheitsverläufen kann es zu langfristigen Beeinträchtigungen der Atemwegsfunktion kommen.

Eine frühzeitige und schnelle Diagnose mit dem **binax NOW® RSV Test** beschleunigt die Therapieentscheidung und hilft so, Spätfolgen der Infektion zu vermeiden.

Leistungsdaten

	Flu A	Flu B	RSV
Sensitivität ²	80 %	65 %	93 %
Spezifität ²	93 %	97 %	93 %

² im Vergleich zur Zellkultur

Produktinformation

- **Bestell-Nr.**
NOW Influenza A & B: 23V41622
NOW RSV: 23V43022 / 23V43042
- **Packungsgröße**
NOW Influenza A & B: 22 Tests
NOW RSV: 22 Tests / 42 Tests
- **Haltbarkeit**
9 Monate ab Herstellung
- **Lagerung**
15-30°C
- **Probenmaterial**
Nasenspülflüssigkeit
Nasen-/Rachenabstrichmaterial
(hierzu benötigen Sie das Abstrichset - siehe Zubehör)
- **Testdauer**
15 Minuten,
positive Ergebnisse bereits früher
- **Zubehör**
Abstrichset,
Nasopharyngeal-Abstrichtupfer
und Elutionslösung Bestell-Nr. 23V40065