

## Influenza A & B Test

### aus Nasenspül-/Aspiratproben und Nasopharyngealabstrichen

Produkt ID: M05IN100


Test für den simultanen und qualitativen Nachweis des Nukleoprotein-Antigens der Influenza A und Influenza B Viren aus Nasenspül-/Aspiratproben sowie Nasopharyngealabstrichen.

Influenza ("echte Grippe") ist eine stark ansteckende, akute Vireninfektion der Atemwege. Die Krankheit überträgt sich leicht durch Husten oder Niesen. Die frühzeitige Diagnose einer Influenza-Erkrankung ermöglicht eine effizientere Therapie und trägt zur Reduzierung des Krankenhausaufenthaltes sowie der damit verbundenen Kosten bei.

Der Test weist auch H5N1 (Vogelgrippe-Erreger) nach.

Das Testkit enthält alles, was Sie für die sichere und saubere Testdurchführung benötigen:

- 1 Influenza A & B Test
- 1 Tupfer
- 1 Spezial-Einwegpipette
- 1 Fläschchen mit Elutionslösung
- 1 Gebrauchsanleitung

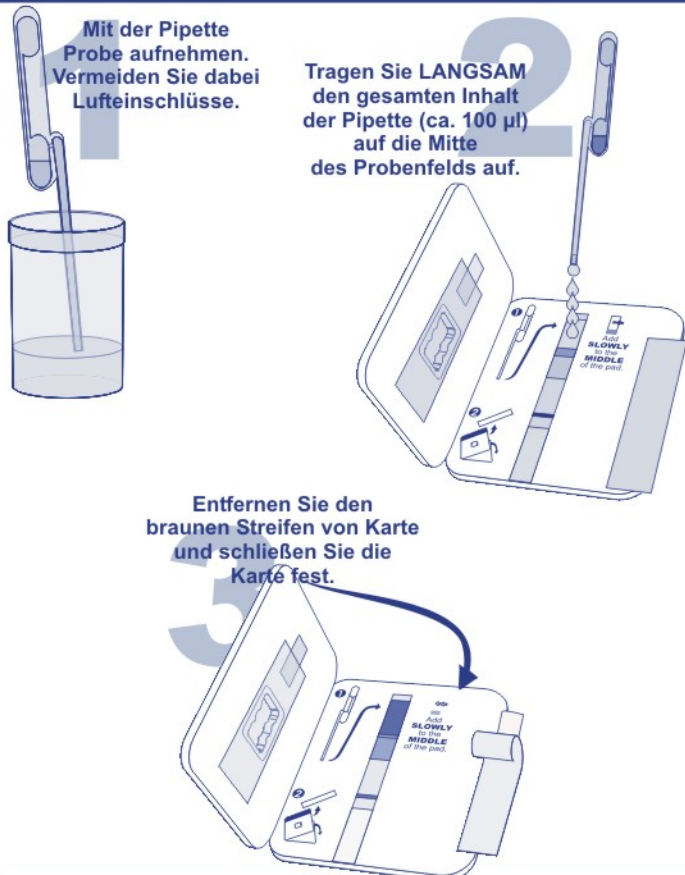

Mit der Pipette Probe aufnehmen. Vermeiden Sie dabei Luftfeinschlüsse.

Tragen Sie **LANGSAM** den gesamten Inhalt der Pipette (ca. 100 µl) auf die Mitte des Probenfelds auf.

Entfernen Sie den braunen Streifen von Karte und schließen Sie die Karte fest.



positiver Test auf Influenza A      positiver Test auf Influenza B      negativer Test

- Nur für den Einmalgebrauch
- 1 Testkarte
- Bei 15°C bis 30°C lagern
- Gebrauchsanleitung beachten
- IVD** Nur für die In-vitro Diagnostik



Zertifizierter Hersteller  
gemäß ISO 9001  
und ISO 13485



**Hersteller:**  
gabmed GmbH  
(Deutschland)  
Praxis- und Drogendiagnostik  
Van-der-Upwich-Str. 33  
D-41334 Nettetal

© copyright by gabmed GmbH  
Rev. 1 / AG / 05-2006

Tel.: +49-(0)800 - 422 63 30  
Fax: +49-(0)1802 - 93 33 39  
Email: info@gabmed.de  
www.gabmed.de

Zertifizierter Hersteller  
gemäß ISO 9001  
und ISO 13485



**Vertrieb Österreich:**  
gabmed GmbH (Österreich)  
Münzgrabenstr. 3  
A-8010 Graz  
Tel.: 0800 - 20 20 18  
Fax: 0810 - 20 20 18